



T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ YENİDOĞAN FOTOTERAPİ CİHAZI KULLANMA TALİMATI	DOKÜMAN KODU	YD.TL.08
	YAYIN TARİHİ	10.12.2021
	REVİZYON NO	01
	REVİZYON TARİHİ	01.01.2024
	SAYFA NO	1 / 1

1.AMAÇ: Fototerapi cihazı kullanımının tanımlanması

2.KAPSAM: Teknik servis birimini ve cihazı kullanan personeli kapsar.

3.SORUMLULAR: Yenidoğan Yoğun bakım ünitesi çalışanları.

4.UYGULAMA:

4.1. Fototerapi cihazının fişi prize takılır.

4.2. Cihaz ON düğmesine basılarak açılır, lambaları kontrol edilir.

4.3. Kuvöz çalıştırılarak ısı ayarlanır. Oda ısı yüksekse 30 °C de, oda ısı normal ise 32-33 °C ye ayarlanır. Bebek çift foto alacaksa fotoların ısı düşünülerek kuvöz ısı minimum 28 °C de tutulur.

4.4. Fototerapi cihazı kuvözün üst kısmına yerleştirilir.

4.5. Fototerapi cihazının fişi prize takılır.

4.6. Kuvöz on düğmesine basılarak çalıştırılır.

4.7. Fototerapi alacak bebeğin genel bakımı (ağız, göz, göbek) yapılır. ANS alınır, emmesi değerlendirilir. Bebek kuvöze bebek bezi bağlanarak çıplak olarak yerleştirilir. Bebeğin gözüne fototerapi gözlüğü takılır. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Sarılık İzlem Formuna bebekle ilgili değerler kaydedilir ve bu değerler doğrultusunda bebeğin tedavisine yön verilir.

4.8. Çocuğun pozisyonu 2 saat aralıklarla değiştirilir.

4.9. İşlem bittikten sonra çocuk kuvözden çıkarılır.

4.10. Lambanın ışık şiddeti ölçülür yada belli aralıklarla değiştirilir.

4.11. Fototerapinin fişi prizden çıkarılır. Cihaz yerine kaldırılır.