



T.C
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
NUMUNE TRANSFER TALİMATI

DOKÜMAN KODU	HB.TL.13
YAYIN TARİHİ	01.05.2006
REVİZYON NO	03
REVİZYON TARİHİ	01.06.2021
SAYFA NO	1 / 1

- 1. AMAÇ:**Alınan numunelerin laboratuvara uygun koşullarda taşınmasını sağlamak.
- 2. KAPSAM:**Laboratuvarlara numune gönderen tüm birimleri kapsar.
- 3. FAALİYET AKIŞI:**
 - 3.1.**Poliklinik kan alma biriminde ve servislerde alınmış, ön kabulü yapılmış numunelernumune kabına barkod yapıştırılarak laboratuvarlara özel taşıma çantaları,pnömatik sistemi ve personel ile transfer edilir.
 - 3.2.**Numune taşıma çantaları temiz olmalıdır. Örnek taşıma çantalarının temizliğinden ilgili örnek transfer personeli sorumludur.
 - 3.3.** Laboratuvarlara giden numuneler acil haller dışında 30 dakika içinde transferi yapılır. Acil numuneler bekletilmeden laboratuvara ulaştırılır.
 - 3.4.**Servislerden laboratuvara numune transferi bekletilmeden yapılır.
 - 3.5.**Transfer işlemi esnasında personel koruyucu eldiven giymelidir.
 - 3.6.** Numune kapaklarının sıkıca kapandığından emin olmalıdır.
 - 3.7.** Numune kapları taşıma kabına devrilmelerini önleyecek şekilde DİKEY olarak yerleştirilmelidir
 - 3.8.**Transfer sırasında taşıma kabının kapağı kapalı olmalıdır.
 - 3.9.**Soğuk ortamda taşınması gereken numuneler için soğuk ortam temiz bir naylon torba içine konulmuş buz aküsü (ağız kapalı plastik buz kalıbı) ile sağlanmalıdır. Bu numuneler diğer numunelerle bir arada taşınmamalıdır.