

	T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN KODU	Dİ.TL.01
		YAYIN TARİHİ	01.05.2006
	HEMODİYALİZ DİYALİZ MAKİNASI HAZIRLAMA TALİMATI	REVİZYON NO	04
		REVİZYON TARİHİ	01.01.2024
		SAYFA NO	1 / 1

1. **AMAÇ:** Hastayı diyaliz işlemine almak için makinenin kısa sürede ve uygun şekilde hazırlanmasını sağlamak.
2. **KAPSAM:** Hemodiyaliz ünitesi, Diyaliz makineleri
3. **FAALİYET AKIŞI**
 - 3.1 Hemşire/tekniker tarafından on-of butonuna basılarak makine açılır ve diyalizat çubukları diyalizat bidonlarına yerleştirilir.
 - 3.2 Makine test programına alınarak testini tamamlaması beklenir.
 - 3.3 Steril olarak gelen hemodiyaliz makinesi seti ve filtresi makine üzerine yerleştirilir. Priming (yıkama) için kullanılacak solüsyon setin arter ucuna takılır.
 - 3.4 Prime tuşuna basılarak doldurma programına başlanır. Set içindeki havanın tamamı boşaltılıncaya kadar işleme devam edilir. Bu işlemde en az 500 cc izotonik kullanılır.
 - 3.5 Belirlenen heparin dozu İnfüzyon şeklinde yapılacaksa 20 cc' lik enjektör kullanılarak İzotonik ile 20 cc ye tamamlanır ilk 5 cc' lik bölümü bolus 15 cc' lik kısmı ise işlemin bitiminden 1 saat önce bitecek şekilde ayarlanır ve infüzyon heparin pompasına yerleştirilir, pompa açılır.
 - 3.6 Hastanın heparin kısıtlaması var ise doldurma programı önce heparinli sıvı ile sonrada heparinsiz sıvı ile tamamlanır.