

	T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN KODU	Dİ.FR.32
		YAYIN TARİHİ	07.11.2013
		REVİZYON NO	00
	PERİTON DİYALİZ ÜNİTESİ APD PET TESTİ	REVİZYON TARİHİ	--
		SAYFA NO	1

1.TEDAVİ TAMAMLANDI YAZISINI GÖRÜNCE	BAS,
2.BAŞLANGIÇ BOŞALTIM MİKTARI	BAS,
3.TOPLAM UF	BAS,
4.ORTALAMA BEKLEME SÜRESİ	BAS,
5.KAYIP SÜRESİ	YEŞİLE BAS. MAKİNADAN AYRIL.
6.CİHAZI KAPAT VE TEKRAR AÇ.	
7.BAŞLAMA TUŞUNA BASIN YAZISINI GÖRÜNCE	BAS,
8.PROGRAMI DEĞİŞTİR	BAS,
9.TEDAVİ CCPD	BAS,
10.TOPLAM MİKTAR	BAS,
11.TEDAVİ ZAMANI	BAS,
12.DOLUM MİKTARI	BAS,
13.SON DOLUM MİKTARI	KIRMIYA BAS VE CİHAZI KAPAT.