

	T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN KODU	ML.TL.04
		YAYIN TARİHİ	01.05.2006
		REVİZYON NO	04
	MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI KAN KÜLTÜRÜ ÇALIŞMA TALİMATI	REVİZYON TARİHİ	01.01.2024
		SAYFA NO	1 / 1

1. AMAÇ

Kan kültürü testinin optimal şartlarda gerçekleştirilmesi.

2. KAPSAM

Kültür Laboratuvarı.

3. UYGULAMA

3.1. Biyolojik Örnek Taşıma Talimatına göre Mikrobiyoloji Laboratuvarına getirilen kan kültür şişeleri Kültür Laboratuvarı Kayıt görevli teknisyenine teslim edilir.

3.2. Kayıt işleminden sonra cihazın bilgisayarına hasta bilgileri girilir.

3.3. Barkod okuyucu ile hafızaya alınır ve hangi kuyucuğa konması gerekirse o kuyucuğa konur.

3.4. Daha önceden cihaza yüklenmiş şişelerden inkübasyon süreleri bitip üreme olmayanlar negatif şişe olarak monitörde gözükür.

3.5. Negatif şişeler cihazdan çıkartılır, “steril” şeklinde sonuç girilir.

3.6. Bu sonuç HYBS programında hasta kayıtlarına geçirilir.

3.7. Pozitif şişelerden işlemi tamamlananlar defterden kontrol edilip **Hastane Atık Talimatına** göre uzaklaştırılır.

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

➤ **Biyolojik Örnek Taşıma Talimatı**

➤ **Kültür Laboratuvarı Talimatı**

➤ **Hastane Atık Talimatına**