

	T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN KODU	ML.TL.01
		YAYIN TARİHİ	01.05.2006
		REVİZYON NO	04
	MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI NEFELOMETRE ANALİZ TALİMATI	REVİZYON TARİHİ	01.01.2024
		SAYFA NO	1 / 1

1. AMAÇ

Nefelometrik yöntemlerle ölçülen bazı testlerin doğru ve hızlı bir biçimde yapılmasını sağlamak.

2. KAPSAM

Mikrobiyoloji Laboratuvarındaki Nefelometre analizörü.

3. UYGULAMA

İlgili teknisyen tarafından aşağıdaki işlemler yapılır:

3.1. Nefelometre testlerinin yapıldığı otoanalizörün bakımı; üretici firma tarafından hazırlanan kılavuzuna veya ekipman sicil kartına göre yapılır.

3.2. Test tipine göre gereken test kitleri cihaza yerleştirilir.

3.3. Gün boyunca gelen tetkik istemleri aygıt çalışma raporu ile takip edilir ve Örnek Hazırlama Biriminden örnekler alınır.

3.4. Aynı gün çalışılabilecek örnekler ayrılır, diğerleri istenen test sayısına göre uygun miktarlarda bölünerek saklama tüplerine konulur ve uygun saklama koşullarında saklanır.

3.5. Kan, idrar, BOS veya diğer vücut sıvısı örnekleri cihaza yüklenir ve test prensiplerine göre çalışılır.

3.6. Dilusyonlu veya dilusyonsuz ölçüm yapılması gereken testler için cihaza komut verilir.