

	T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN KODU	MC.TL.10
		YAYIN TARİHİ	01.05.2006
		REVİZYON NO	04
	İNFÜZYON POMPASI CİHAZI BAKIM VE KALİBRASYON TALİMATI	REVİZYON TARİHİ	01.01.2024
		SAYFA NO	1 / 2

1. AMAÇ: Hastane bünyesinde infüzyon pompalarının kalibrasyon merkezi personeli tarafından bakım ve kalibrasyonunun yapılmasının anlatılması.

2. KAPSAM:Hastane bünyesindeki İnfüzyon Pompalarının bakım ve kalibrasyonunu kapsar.

3. FAALİYET AKIŞI:

3.1. TEMİZLİK

3.1.1. Bakım ve kalibrasyonu yapılacak cihazın temizliğini kontrol et.eğer cihaz temiz değil ise kalibrasyona başlamadan önce cihazı dezenfektan ile temizle.

3.2. BAKIM

3.2.1. Günlük Bakım

3.2.1.1. Hastane bünyesindeki infüzyon pompası cihazlarının günlük bakımı, cihazların kullanıcı personeli tarafından yapılır.

3.2.1.2. İnfüzyon pompası cihazının genel temizliği yapılır.

3.2.1.3. İnfüzyon pompası cihazının genel çalışma performansı kontrol edilir.

3.2.1.4. İnfüzyon pompası cihazında herhangi bir arıza tespit edilirse arıza işlemi başlatılır.

3.2.2. Yıllık Periyodik Bakım

3.2.2.1. Hastane bünyesindeki infüzyon pompası cihazlarının yıllık periyodik bakımı, tıbbi cihaz bakım onarım ve kalibrasyon merkezi personeli tarafından yapılır.

3.2.2.2. İnfüzyon pompası cihazının genel temizliği yapılır.

3.2.2.5. Cihazın genel çalışma performansı kontrol edilir.

3.2.2.6. Cihazda herhangi bir arıza tespit edilirse arıza işlemi başlatılır.

3.3. CİHAZLARIN ORTAM KOŞULLARINA STABİLİZASYONU

3.3.1. Bakımı tamamlanan ve kalibrasyonda kullanılacak cihazlar çalışır durumda en az 10 dakikalık süre ile bırakılır.

3.3.2. Bu süre; cihazların çok farklı ortam koşullarından gelmesi halinde. uzatılarak stabilizasyon sağlanır.

“Kalite Yönetim Sistemi” Klasöründe bulunan belge güncel ve kontrollü olup, baskı alınmış KONTROLSUZ belgedir.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.

	T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN KODU	MC.TL.10
		YAYIN TARİHİ	01.05.2006
		REVİZYON NO	04
	İNFÜZYON POMPASI CİHAZI BAKIM VE KALİBRASYON TALİMATI	REVİZYON TARİHİ	01.01.2024
		SAYFA NO	2 / 2

3.4. TESTİN YAPILIŞI

3.4.1. İnfüzyon pompası cihazına uygun set kullan, hortumlarında hava kabarcıkları kalmamasına ve akışı engelleyecek bir tıkanıklığın olup olmadığını kontrol et.

3.4.2. İnfüzyon pompası test cihazı ile bağlantıyı yap.

3.4.3. İnfüzyon pompası test cihazında Set-up ayarlarını yap.

3.4.4. Ölçümü yapılacak cihazın bilgilerini gir.

3.4.5. Ölçümü yapılacak cihazın çalışma aralığında en az **3** nokta belirle ve bu noktalarda Akış testi yap.

3.4.6. Test sonunda bilgisayar programında test sonuçlarını yazdır.