

	T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN KODU	MC.TL.16
		YAYIN TARİHİ	01.05.2006
	ELEKTRİKSEL GÜVENLİK TEST CİHAZI KALİBRASYONU TALİMATI	REVİZYON NO	04
		REVİZYON TARİHİ	01.01.2024
		SAYFA NO	1 / 1

1.AMAÇ:Hastane bünyesinde Elektriksel Güvenlik Testinin Kalibrasyon Merkezi personeli tarafından yapılmasının anlatılması.

2.KAPSAM: Bu talimat, hastane bünyesindeki Elektriksel Güvenlik Testine tabi cihazları kapsar.

3.FAALİYET AKIŞI:

3.1.Temizlik

3.1.1. Kalibrasyonu yapılacak cihazın temizliğini kontrol et, eğer cihaz temiz değil ise kalibrasyona başlamadan önce cihazı dezenfektan ile temizle.

3.2.Cihazların ortam koşullarına stabilizasyonu

3.2.1. Kalibrasyonda kullanılacak cihazlar çalışır durumda en az 10 dakika süre ile bekletilir.

3.2.2. Bu süre; cihazların farklı ortam koşullarından gelmesi halinde, uzatılarak stabilizasyon sağlanır.

3.3.Testin Yapılışı

3.3.1. Elektriksel Güvenlik Test cihazının bağlantı kabloları ve yazıcı arasındaki bağlantıları yap.

3.3.2. Setup ayarlarını yap.(gecikme zamanı, ekstra toprak koruması, yeni güç konfigürasyonu, yeni modül,çoklu koruyucu toprak testi,çoklu şasi testi)

3.3.3. Elektriksel güvenlik test cihazına testi yapılacak cihazın bilgilerini gir.

3.3.4. Varsa hasta bağlantılarını tanımla.

3.3.5. Ölçümü yapılacak cihazın sınıfını ve tipini belirle ve elektriksel güvenlik test cihazına yapılacak testin standardı ile bu bilgileri gir.

3.3.6. Güç kablosu testini yap.

3.3.7. Elektriksel güvenlik test cihazından testi başlat ve test bitiminde sonuçları kaydet.

3.3.8. Test işlemi bitiminde yazıcıdan çıktı al.