

	T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN KODU	TH.TL.05
		YAYIN TARİHİ	01.05.2006
		REVİZYON NO	04
	KAN MERKEZİ IŞINLAMA CİHAZI KULLANMA TALİMATI	REVİZYON TARİHİ	01.01.2024
		SAYFA NO	1 / 1

1. AMAÇ: Kan Merkezinde bulunan ışınlama cihazının doğru ve hızlı bir biçimde çalışmasını sağlamak.

2. KAPSAM: Kan merkezi ışınlama ünitesindeki ışınlama cihazı.

3. FAALİYET AKIŞI:

3.1.Anahtar sağa doğru çevrilerek açılır.

3.2.Cihazın kapağı açılır ve kan veya kan komponenti ters bir şekilde silindir şeklindeki kutuya yerleştirilir.

3.3.Kontrol panelinde 1 tuşuna basılır.

3.4.Tuşlar yardımıyla 21 yazılır ve ENTER tuşuna basılır.

3.5.Ekranda PIN yazısı görülür ve 54321 yazılır ve ENTER tuşuna basılır.

3.6.Kontrol panelinde 1 tuşuna basılır.

3.7.Ekranda HH MM SS yazıları görülür.

3.8.Kan ışınlama cihazı ışınlama süreleri çizelgesinden satırlardan ışınlama işleminin yapıldığı tarih bulunur ve 2500cGy sütununa karşılık gelen süre,

HH MM SS

00 03 22 yerine yazılır.

3.9.İki defa ENTER tuşuna basılır.

3.10.START tuşuna basılarak işlem başlatılır.

3.11.İşlem bitiminde cihaz sesli uyarı verir. Komponent cihazın kapağı açılarak cihazdan çıkartılır.

3.12.Anahtar sola çevrilerek cihaz kapatılır.