

	T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN KODU	TH.TL.08
		YAYIN TARİHİ	01.05.2006
		REVİZYON NO	04
	KAN MERKEZİ KAN SAKLAMA DOLABI KULLANMA TALİMATI	REVİZYON TARİHİ	01.01.2024
		SAYFA NO	1 / 1

1. AMAÇ: Kan saklama dolabının kullanım amacına uygun ve optimal performans ile çalıştırılmasıdır.

2. KAPSAM: Kan merkezi ve ameliyathaneleri kapsar.

3. FAALİYET AKIŞI:

Aşağıdaki işlemler kan merkezi ve ameliyathanelerde görevli personel tarafından gerçekleştirilir. Kan saklama dolabı eritrosit süspansiyonlarının saklama süreleri boyunca eritrositlerin optimum canlılıkta kalabilmeleri için gerekli olan 2-6 °C ısıyı sağlamak üzere dizayn edilmiştir.

3.1.Yöntem

3.1.1.Kan saklama dolabına kesinlikle patolojik materyaller, farmasötik ürünler ya da gıdalar konulmaz.

3.1.2.Gösterge 2-6 °C aralığında olacak şekilde sürekli izlenir. Bu aralıklar dışındaki sıcaklık değerlerinde soğutma atölyeleri aranarak bilgilendirilir.

3.1.3.Buzdolabı kapısı iç ısı değişikliği oluşturmaması için uzun süre açık tutulmaz.

3.1.4.Kan saklama dolaplarındaki teknik sorunları gidermek için soğutma atölyesi aranarak önerdiği talimatlar uygulanır.

3.1.5.Kan saklama dolapları için aşağıdaki uygulamalar yapılır.

3.2.Bakım

3.2.1. Günlük olarak cihazın içindeki distile su seviyesini gözle kontrol edilir.

3.2.2. Aylık olarak cihazın distile suyu değiştirilir. Distile suyu değiştirilirken su kabı temizlenir.

3.2.3. Cihazın filtrelerini aylık periyotlarda temizletilir.