

	T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN KODU	TH.TL.14
		YAYIN TARİHİ	01.04.2013
		REVİZYON NO	03
	KAN MERKEZİ INCOBATOR KULLANMA TALİMATI	REVİZYON TARİHİ	01.01.2024
		SAYFA NO	1 / 1

1. **AMAÇ:** Incubator Cihazının çalışmasının düzenlenmesi

2. **KAPSAM:** Incubator cihazını kapsar.

3.**FAALİYET AKIŞI:**

- Cihaz arkasındaki açma kapama düğmesinden açılır.
- İncubatorün 37 ° C'ye gelmesi beklenir.
- Hazırlanan numuneler cihazın içerisine yerleştirilir.
- Start düğmesiyle 15 dakika geri sayım başlatılır.
- Süre sonunda cihaz sesli uyarı verir.
- Kapak manuel açılarak numune alınır.