

	T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN KODU	TH.TL.21
		YAYIN TARİHİ	01.04.2013
		REVİZYON NO	03
	KAN MERKEZİ NÜVE 1215 MANUEL CROSS SANTRİFÜJÜ KULLANMA TALİMATI	REVİZYON TARİHİ	01.01.2024
		SAYFA NO	1 / 1

1. **AMAÇ:** Nüve marka santrifüj cihazının çalışmasının düzenlenmesi

2. **KAPSAM:** Nüve 1215 Santrifüj cihazını kapsar.

3. **FAALİYET AKIŞI:**

3.1. Cihaz önündeki açma kapama düğmesinden açılır.

3.2. Uygun şekilde hazırlanan polistrene tüpler cihaza karşılıklı denge oluşturacak şekilde yerleştirilir.

3.3. Kapağı kapatılarak ön çalıştırma tuşuna basılır.

3.4. 1030 devirde 1 dakika çalışan cihaz düğmesinden kapatılır ve değerlendirilir.