

	T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN KODU	TH.TL.20
		YAYIN TARİHİ	01.04.2013
		REVİZYON NO	03
	KAN MERKEZİ HELMER MARKA TROMBOSİT ÇALKALAYICISI KULLANMA TALİMATI	REVİZYON TARİHİ	01.01.2024
		SAYFA NO	1 / 1

1. **AMAÇ:** HelmerTrombosit çalkalayıcısı cihazının çalışmasının kullanımının düzenlenmesi.

2. **KAPSAM:** Helmer cihazını kapsar.

3. **FAALİYET AKIŞI:**

3.1. Cihaz kontrol panelindeki açma - kapama düğmesi ile açılır.

3.2. Cihaz Kontrol panelindeki sıcaklık artma – eksiltme butonları ile istenilen sıcaklığa ayarlanır. (22-24°C)trombositler uygun şekilde cihaz içindeki raflara yerleştirilir.

3.3. Trombositler bu şekilde azami 5 gün muhafaza edilebilir.

3.4. Herhangi arıza durumunda cihaz sesli olarak uyarı verecektir.

3.5. Alarmı durdurmak için rafların altındaki butona basılır.