

	T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN KODU	TH.TL.04
		YAYIN TARİHİ	01.05.2006
		REVİZYON NO	04
	KAN MERKEZİ İMMÜNOHEMATOLOJİK TESTLER ÇALIŞMA TALİMATI	REVİZYON TARİHİ	01.01.2024
		SAYFA NO	1 / 1

1. **AMAÇ:** Kan merkezinde uygulanan immünohematolojik testlerin prensiplerini açıklamak.

2. **KAPSAM:** Kan merkezi immünohematoloji laboratuvarındaki tüm testler.

3. **FAALİYET AKIŞI:**

3.1.İmmünohematolojik testler ile ilgili testin spesifik çalışması immünohematolojik çalışma yöntemleri klasöründeki bilgilerden faydalanarak yapılır.

3.2.Across cihazı günlük bakımı yapıldıktan sonra gerekli solüsyonları değiştirilir.

3.3.Cihaz baştan başlatılarak cihazın çalışılacağı konfigurasyon seçilir. Çalışılacak olan testlerin jel kartları cihaza yüklenir.

3.4.İstenilen tetkik türüne göre alınmış antikoagülanlı tam kan veya serum örnekleri **Örnek Hazırlama Talimatı**nda belirtildiği gibi hazırlanır.

3.5.Hazırlanan örnekler cihaza girilerek çalışılacak olan test türü cihazdan seçilir.

3.6.Testler cihazdan çıktıktan sonra kontrol edilir, düzeltmeleri varsa yapılır ve hastane otomasyonundan onaylanır.

3.7.Çalışılan test cross ise kan ve kan ürünleri istek kağıdına cross uygun yazılarak cross barkodu çıkarılması için ayrılır ve sonuçlar **Kan Grubu, Cross Defterine** yazılır.

3.8.Çalışılan numune kanlar 7 gün saklanmak üzere ayrılır.