

	T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN KODU	TH.TL.17
		YAYIN TARİHİ	01.04.2013
		REVİZYON NO	03
	KAN MERKEZİ HELMER MARKA PLAZMA VE CRYOPRESİPİTATERİTME TALİMATI	REVİZYON TARİHİ	01.01.2024
		SAYFA NO	1 / 1

1. AMAÇ: Derin dondurucuda dondurulmuş plazma ve cryopresipitatların uygun ısıda 37 derecede eritilmesini sağlamak.

2. KAPSAM: Helmer cihazını kapsar.

3. FAALİYET AKIŞI:

3.1.Cihaz poşetinin içine plazmalar konularak 8 adet 37 derecede cihazın start düğmesine basılarak çalıştırılır.

3.2.16 dakika sonar cihaz sesli mesaj vererek eritme işleminin bittiğini uyarı verir.

3.3.Plazmalar servis personeline teslim edilir.