

	T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN KODU	TH.TL.19
		YAYIN TARİHİ	01.04.2013
		REVİZYON NO	03
	KAN MERKEZİ SANTRİFÜJ NF 200 KULLANMA TALİMATI	REVİZYON TARİHİ	01.01.2024
		SAYFA NO	1 / 1

1. AMAÇ: Santrifüj cihazı çalışmasının düzenlenmesi

2. KAPSAM: Santrifüj cihazını kapsar.

3. FAALİYET AKIŞI:

- Cihaz arkasındaki açma kapama düğmesinden açılır.
- LID Düğmesi yanınca yine LID düğmesine basılarak kapağı açılır.
- Numuneler karşılıklı denge sağlayacak şekilde yerleştirilir.
- Start düğmesine basılarak çalıştırılır.
- 3000 devirde 3 dakika çevrilerek santrifüj gerçekleştirilir.
- Cihaz işlem bitince sesli uyarı verir.
- LID düğmesi yanınca LID düğmesine basılarak kapak açılır.

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
	Kalite Direktörü	Başhekim

“Kalite Yönetim Sistemi” Klasöründe bulunan belge güncel ve kontrollü olup, baskı alınmış KONTROLSUZ belgedir.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.