

	T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN KODU	RG.TL.06
		YAYIN TARİHİ	15.03.2022
		REVİZYON NO	01
	RADYOLOJİ ÜNİTESİ ULTRASON CİHAZI KULLANMA TALİMATI	REVİZYON TARİHİ	01.01.2024
		SAYFA NO	1 / 1

1.AMAÇ : Ultrasonografi cihazlarının verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

2.KAPSAM: Bölümümüzde kullanılan ultrasonografi cihazlarını kapsamaktadır.

3. FAALİYET AKIŞI:

3.1. Güç kaynağının üzerindeki elektrik devresini kesen düğmeyi **ON** konumuna getirdiğinizden emin olun

3.2. Güç kaynağının üzerindeki devre kesen düğmeyi yukarı **ON** konumuna getiriniz.

3.3.Ultrasonografi cihazının sol yanında **POWER** düğmesini **AKTİF** konumuna getiriniz.

3.4.Cihaz kendi başlamasını sağlarken ve self-test uygularken bir dakika bekleyiniz.

3.5 Cihaz çalışmadığı takdirde teknik servise haber veriniz.

3.6.Sistemi başka bir yere taşımayı planlamadığınız takdirde ve işleminiz sona erdiğinde

SHUTDOWN yapmanız yeterli olacaktır.

3.10.Ultrasonografi cihazı ile uygulanan işlemden sonra problemleri itina ile temizleyiniz.

4.İLGİLİ DÖKÜMANLAR:

Cihaz Kullanım Kılavuzu.