

	T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN KODU	PL.TL.04
		YAYIN TARİHİ	01.05.2006
		REVİZYON NO	04
	PATOLOJİ LABORATUVARI BOYAMA ODASI TALİMATI	REVİZYON TARİHİ	01.01.2024
		SAYFA NO	1 / 1

- AMAÇ:** Preperatların boyanması aşamasında yapılacak işlemleri ve sorumlularını belirlemek.
- KAPSAM:** Patoloji Anabilim Dalı Laboratuvarında boya odasında yapılan işlemleri kapsar.
- FAALİYET AKIŞI**
 - Havalandırma şartlarının açılmasıyla ve boyama cihazının solüsyonları sorumlu teknisyen tarafınca değiştirilerek set tamamlanıp cihaz self-test yaptırılır.
 - Kapama işleminin yapılacağı tezgah hazırlanır. (kurutma kağıtları zemine serilir, entelan, lamel, damlalık, gazlıbez, mape hazır edilir.)
 - Dokulara H+E boyama işlemleri uygulanır, sitolojilere Papanicolau boyama işlemleri uygulanır.
 - Otomatik boyama cihazında hangi boya yapılacaksa (Program 1 H+E, Program 2 PAP ayarlanmıştır.) o programa girilir, sepet uygun şekilde robota takılır ve işlem başlatılır.
 - Boyama işlemi tamamlanınca cihaz uyarı verir. Complay yapılır, sepet alınarak kapama tezgahında kurutma kağıtları üstünde entelan damlatılarak lamelle dokuların üstü kapatılır ve kuruması beklenir.
 - Kuruyan preparatların asetatlı kalemlemlerle protokol ve tarihleri yeniden yazılır. Makroskopi inceleme ile alınan parça sayısı, preparatlar üzerindeki parça sayısı ile karşılaştırılır, kontrolü yapılmış preparatlar mapelere dizilerek görevli teknisyen tarafında asistan odasına teslim edilir ve teknisyen teslim ettiği rapor ve preparat adetini belirten listesini dosyalar, işlem tamamlanır.
 - Cihazlar ana şartelden kapatılır, suları dökülür ve kapakları kapatılarak ertesi güne hazır olacak şekilde bırakılır.
 - Cihazın solüsyonları kullanma sıklığına bakılmadan 5 günde bir değiştirilir.