

	T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ PATOLOJİ LABORATUVARI MAKROSKOPİ ODASI TALİMATI	DOKÜMAN KODU	PL.TL.08
		YAYIN TARİHİ	01.05.2006
		REVİZYON NO	04
		REVİZYON TARİHİ	01.01.2024
		SAYFA NO	1 / 3

- AMAÇ:** Makroskopi işlemlerinin ve sorumlularının belirlenmesi.
- KAPSAM:** Patoloji Anabilim Dalı Laboratuarında makroskopi odasında yapılan işlemleri kapsar.
- UYGULAMA**
 - Makroskopi saati başlamadan Laboratuar teknisyenlerinin kontrol ve hazırlıkları.
 - Sekreterlik tarafından kayıt işlemleri tamamlanmış rapor ve örneklerin kontrolü yapılır, makroskopi alınırken ihtiyaç olan sarf malzemelerin kontrolü yapılır ve eksikler tamamlanır (Pamuk, gazlı bez, etiket kağıtları, parça kasetleri, kapları ve dekalsifikasyon için kullanılan asitler v.b.)
 - Makroskopi başlama saatinde (saat 14.00) asistan ve laboratuar teknisyenleri birlikte makro alırlar. Yazılan makroskopik inceleme raporları alınan kutusuna, tespiti alınanların raporlarını ise tespit rapor kutusuna teknisyen tarafınca konur.
 - Tariflenerek alınan parçalar (makro alınma süresince formalin içinde bekletilir.) OTOTEKNİKON sepetine dizilerek cihaza konur, kapağı kapatılır ve takip işlemi başlatılır. (Cihazın içinde solüsyon görülene kadar beklenilir sonra teknisyen ayrılır.
 - Tariflenen, parçası alınan parçalar piyes deposuna ilgili asistan tarafınca taşınır, tespiti alınanlar ise çalıştığı birimin (departmanın) lavabosunun altındaki tespit dolaplarına yerleştirir ve çalıştığı alanı temizler, diseksiyon aletlerini sudan geçirdikten sonra temizlenen solüsyon kabının içine atarak işlem sonlanır.
 - Patoloji raporu yazılmış, arta kalan parçalar, kırmızı poşetlere konarak yakılmak üzere, büyük parçalar ise Belediye'ye haber verilerek mezarlığa gömülmek üzere teknisyen tarafından ayrılır.
 - Bilimsel değeri olan makroskopik materyal ayrılarak patoloji makroskopi müzesinde saklanmak üzere özel işlemler uygulanır.
 - a)** Sitoloji: Enjektör-tüp v.s. kaplarda gönderilen sıvıların tamamı santrifüj (2000-3000 rpm-5 dk.) edilerek, sitolojilerden sorumlu tekniker tarafınca yaymaları yapılır.
b) Balgam materyali: Tariflenerek koyu renkteki kanamalı alanlarda özellikle bir parça olarak direkt yaymaları yapılır. Tüm yaymalar %80 alkolde derhal tespit edilir.
 - Hücre Bloklama**
 - Santrifüj-yayma sonrası tüpte kalan (H.B) yoğun katı kısmın tamamı gazlı bez veya kurutma kağıdına sarılarak takip işlemi uygulanır ve bloklanır.
 - Tamamı santrifüj edilemeyecek miktardaki sıvıların üstüne fiksatif eklenerek (1/2 oranında) bir akşam bekletilir ve hücrelerin alta çökmesi sağlanır. Çöktelinin tamamı takibe alınır ve rutin takip işlemlerinden geçirilir arta kalan sıvıdan 3 cam yayma tekrar teknisyen tarafınca yapılır. Sitoloji raporuna (HB yapıldı) notu yazılır.
 - Yaymaları yapılan sıvılar alkolde tespitten sonra boyaması yapılır (PAP) (bkn. Boyama talimatı)
 - Teknisyen tarafından cihazın solüsyonları 5 günde bir değiştirilir ve hafızasına kayıt edilir.

	T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN KODU	PL.TL.08
		YAYIN TARİHİ	01.05.2006
		REVİZYON NO	04
	PATOLOJİ LABORATUVARI MAKROSKOPİ ODASI TALİMATI	REVİZYON TARİHİ	01.01.2024
		SAYFA NO	2 / 3

“Kalite Yönetim Sistemi” Klasöründe bulunan belge güncel ve kontrollü olup, baskı alınmış KONTROLSUZ belgedir.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.

	T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN KODU	PL.TL.08
		YAYIN TARİHİ	01.05.2006
		REVİZYON NO	04
	PATOLOJİ LABORATUVARI MAKROSKOPİ ODASI TALİMATI	REVİZYON TARİHİ	01.01.2024
		SAYFA NO	3 / 3

“Kalite Yönetim Sistemi” Klasöründe bulunan belge güncel ve kontrollü olup, baskı alınmış KONTROLSUZ belgedir.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.