



T.C
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

PATOLOJİ LABORATUVARI OTOTEKNİKON CİHAZI
KULLANIM TALİMATI

DOKÜMAN KODU	PL.TL.02
YAYIN TARİHİ	01.05.2006
REVİZYON NO	04
REVİZYON TARİHİ	01.01.2024
SAYFA NO	1 / 1

1. AMAÇ: Doku takip işlemlerinin en iyi ve kısa sürede yapılması aşamalarının belirlenmesi.

2. KAPSAM: Patoloji Anabilim Dalı laboratuvarı ototeknikon cihazında yapılan işlemler.

3. FAALİYET AKIŞI

3.1. Makroskopisi yapılmış ve takip kasetlerinin içine yerleştirilmiş dokuları görevli teknisyen tarafından suda yıkandıktan sonra cihazın takip sepetine dizilir cihaza takılır ve kapağı kapatılır.

3.2. Takip programı seçilen (1 rutin, 2 nolu hafta sonu) start yapılır (Bkz. Ototeknikon kullanma kılavuzu) haznesinde solüsyon görünene kadar beklenir.

3.3. Takip programı tamamlandıktan sonra Drain butonuna basılarak solüsyon boşaltılır. LİD butonu boşalt kapağı açılarak kasetler alınır ve bloklama işlemine geçilir.

3.4. Bloklama işleminden sonra boşaltılan kaset ve sepetler (FLUSH programında) cihaza takılarak yıkanır tekrar makroskopi alımına hazır hale getirilir.

3.5. Cihazın kullanımı kullanım klavuzuna göre kullanılır.

Takip Basamakları

- Formalin 30 dak.
- Alkol %60 30 dak.
- Alkol %70 1 saat
- Alkol %80 1 saat
- Alkol %90 1 saat
- Alkol %95 1 saat
- Absolü alkol 1 saat
- Absolü alkol 2 saat
- Xylol 2 saat
- Parafin 62 C 1 saat
- Parafin 1 saat
- Parafin 1 saat
- Parafin 1 saat

“Kalite Yönetim Sistemi” Klasöründe bulunan belge güncel ve kontrollü olup, baskı alınmış KONTROLSUZ belgedir.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.