

	T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN KODU	DL.TL.02
		YAYIN TARİHİ	03.04.2014
	DOKU TİPLEME LUMINEX KULLANMA TALİMATI	REVİZYON NO	02
		REVİZYON TARİHİ	01.01.2024
		SAYFA NO	1 / 1

1.AMAÇ VE KAPSAM: Cihazı etki ve verimli kullanma

2.GÖREV VE SORUMLULUK: Cihazın kullanımından doku tiplleme çalışanları sorumludur

Kayıtlar: Cihaz Günlük Bakım Formu

3.TALİMATIN DETAYI:

- 1.Önce bilgisayar açılır.
- 2.Luminex' e bağlı olan üç açma-kapama düğmesinden cihaz açılır.
- 3.30 dakika boyunca cihazın lazerinin ısınması beklenir.
- 4.İsınma esnasında cihazın günlük yıkaması yapılır.
- 5.Hazırlanan örnekler cihaza yüklenir.
- 6.Yazıcı ile analiz sonuçlarının çıktısı alınır.
- 7.İşlem bittikten sonra cihazın günlük kapama işlemi yapılır.
- 8.Cihaz açma-kapama düğmelerinden kapatılır.
- 9.Daha sonra bilgisayar kapatılır.

4.ARIZA VE BAKIM:

- 1.Günlük toz ve kirler yumuşak nemli bir bezle temizlenir
- 2.Arıza durumunda teknik sorumlu bilgilendirilir