

	T.C NEC METTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN KODU	DL.TL.06
		YAYIN TARİHİ	15.04.2014
	DOKU TIPLENDİRME LABORATUARINA ÖRNEKLERİN TRANSFERİ TALİMATI	REVİZYON NO	03
		REVİZYON TARİHİ	01.01.2024
		SAYFA NO	1 / 3

1.AMAÇ:

2.KAPSAM: Doku tiplendirme laboratuvarı, kan alma ve tüm klinikleri kapsar.

3.FAALİYET AKIŞI:

3.1.Alınan tüm kanlar kan alma odasında ve oda sıcaklığında biriktirilir. Bu odanın oda sıcaklığının 25C olup olmadığı kontrol edilir.

3.2.Genetik polikliniğinde görevli personel gün içerisinde saat 10.00, 14.00 ve 16.00 olmak üzere üç defa alınmış örnekleri örnek taşıma kabında laboratuvarımıza sorumlu kişiye teslim etmektedir.

3.3.Lenfosit cross match testleri bekletilmeden laboratuvara ulaştırılır. Numune kabul saati en geç saat 10:00 dir.

3.4.Kadavradan organ nakillerinde numuneler bekletilmeden laboratuvara teslim edilir.

3.5.Numunelerin transferi esnasında personele ve çevreye bulaşı önlemek için taşıma işlemi azami dikkat göstererek yapılır.

3.6.Transfer işlemi esnasında personel koruyucu eldiven giymelidir.

3.7.Numune kapaklarının sıkıca kapandığından emin olmalıdır.

3.8.Numune kapları taşıma kabına devrilmelerini önleyecek şekilde dikey olarak yerleştirilmelidir.

3.9.Transfer esnasında sert ve ani hareketlerden kaçınılmalı, numunelerin çalkalanmamasına dikkat edilmelidir.

3.10.Taşıma kaplarının temizliğine dikkat edilmelidir. Her hafta mesai bitiminden önce deterjanlı su, ardından %1 lik çamaşır suyu ile temizlenir. Eğer kap içine biyolojik materyal bulaşmışsa üzerine %10 luk çamaşır suyu ile ıslatılmış gazlı bez, kağıt havlu vb.ile kapatılıp 15 dk bekledikten sonra temizlenir

3.11.İlgili çalışanlara örnek alımı ve transferi konusunda eğitim verilmiştir.

3.11.Örneklerin Laboratuvara kabulü

- ❖ Örnekler görevli personel tarafından kabul edilmektedir.
- ❖ Sorumlu kişi tarafından teslim alınan örnekler, test istem formları, tüplerin üzerindeki barkod bilgileri ve hasta kayıt defteri kontrol edilerek teslim alınır.
- ❖ Örnekler test rehberinde belirtilen kabul ve ret kriterlerine göre kabul edilir.
- ❖ Laboratuar tarafından reddedilen örnekler aylık olarak analiz edilmeleri için kayıt altına alınır. Bu örnekler için gerekli düzenleyici önleyici faaliyet başlatılır.



T.C
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

DOKU TİPLENDİRME LABORATUVARINA ÖRNEKLERİN TRANSFERİ
TALİMATI

DOKÜMAN KODU	DL.TL.06
YAYIN TARİHİ	15.04.2014
REVİZYON NO	03
REVİZYON TARİHİ	01.01.2024
SAYFA NO	2 / 3

DOKU TİPLEME LABORATUVARI SONUÇLARINA ERİŞİM VE SONUÇ TESLİM SÜRESİ:

TEST	ÇALIŞMA METODU	ÇALIŞMA ZAMANI	SONUÇ VERME SÜRESİ	NUMUNE KABI	NUMUNE MİKTARI	TRANSFE Rİ	ÖRNEK TÜRÜ
HLA-A	MOLEKÜLER SSO / SSP	HER GÜN	4-8 İŞ GÜNÜ	EDTA'LI TÜP	2 ML	18-24 C 1GÜN	PERİFERİK KAN
HLA-B	MOLEKÜLER SSO / SSP	HER GÜN	4-8 İŞ GÜNÜ	EDTA'LI TÜP	2 ML	18-24 C 1GÜN	PERİFERİK KAN
HLA-C	MOLEKÜLER SSO / SSP	HER GÜN	4-8 İŞ GÜNÜ	EDTA'LI TÜP	2 ML	18-24 C 1GÜN	PERİFERİK KAN
HLA-DR	MOLEKÜLER SSO / SSP	HER GÜN	4-8 İŞ GÜNÜ	EDTA'LI TÜP	2 ML	18-24 C 1GÜN	PERİFERİK KAN
HLA-DQ	MOLEKÜLER SSO / SSP	HER GÜN	4-8 İŞ GÜNÜ	EDTA'LI TÜP	2 ML	18-24 C 1GÜN	PERİFERİK KAN
HLA-B27	MOLEKÜLER SSO / SSP	HER GÜN	4-8 İŞ GÜNÜ	EDTA'LI TÜP	2 ML	18-24 C 1GÜN	PERİFERİK KAN
HLA-B51	MOLEKÜLER SSO / SSP	HER GÜN	4-8 İŞ GÜNÜ	EDTA'LI TÜP	2 ML	18-24 C 1GÜN	PERİFERİK KAN
CDC CROSS-MAT	SEROLOJİK	HER GÜN	2 GÜN	VERİCİ İÇİN ACD'li	VERİCİDEN 10 ML ACD'LI TÜPE	18-24 C 1GÜN	PERİFERİK KAN /DALAK (KADAVRA VERİCİ İÇİN)
				VERİCİ İÇİN KIRMIZI/SARI KAPAKLI JELLİ	VERİCİDEN 3 ML JELLİ TÜPE		
				HASTA İÇİN KIRMIZI/SARI KAPAKLI JELLİ	HASTADAN 3 ML JELLİ TÜPE		
PRA CLASS I/II TARAMA	LUMİNEX	HER GÜN	4-8 İŞ GÜNÜ	KIRMIZI/SARI KAPAKLI JELLİ	3 ML	18-24 C 1GÜN	PERİFERİK KAN
PRA CLASS I TANIMLAMA	LUMİNEX	HER GÜN	4-8 İŞ GÜNÜ	KIRMIZI/SARI KAPAKLI JELLİ	3 ML	18-24 C 1GÜN	PERİFERİK KAN

"Kalite Yönetim Sistemi" Klasöründe bulunan belge güncel ve kontrollü olup, baskı alınmış KONTROLSUZ belgedir.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.



T.C
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

DOKU TIPLENDİRME LABORATUARINA ÖRNEKLERİN TRANSFERİ
TALİMATI

DOKÜMAN KODU

DL.TL.06

YAYIN TARİHİ

15.04.2014

REVİZYON NO

03

REVİZYON TARİHİ

01.01.2024

SAYFA NO

3 / 3

PRA CLASS II TANIMLAMA	LUMİNEX	HER GÜN	4-8 İŞ GÜNÜ	KIRMIZI/SARI KAPAKLI JELLİ	3 ML	18-24 C 1GÜN	PERİFERİK KAN
DSA	LUMİNEX	HER GÜN	4-8 İŞ GÜNÜ	VERİCİ İÇİN EDTALI	VERİCİDEN 10 ML EDTA LI TÜPE	18-24 C 1GÜN	PERİFERİK KAN /DALAK (KADAVRA VERİCİ İÇİN
				HASTA İÇİN KIRMIZI/SARI KAPAKLI JELLİ	HASTADAN 3 ML JELLİ TÜPE		

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
	Kalite Direktörü	Başhekim

"Kalite Yönetim Sistemi" Klasöründe bulunan belge güncel ve kontrollü olup, baskı alınmış KONTROLSUZ belgedir.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.