

	T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DÖKÜMAN NO	DL.YD.06
		YAYIN TARİHİ	01.01.2016
		REVİZYON NO	01
	DOKU TİPLEME LABORATUVARI TEST İŞLEMİ TAMAMLANMIŞ ANALİZ ÖRNEKLERİ, TEST VERİLERİ VE SONUÇLARIN ARŞİVLENMESİNE YÖNELİK KURALLAR	REVİZYON TARİHİ	--
		SAYFA NO	1 / 1

1. Analiz işlemleri tamamlanmış numuneler (DNA,serum,hücre lizatı) 2ml lik eppendorf tüplerinde muhafaza edilir.
2. Eppendorf tüplerinin üzerine hasta veya donöre ait bilgiler asetat kalemı yazılır.(ad soyad,hastaya verilen laboratuvar numarası)
3. Arşivlenecek tüpler özel kutulara uygun sıraya göre yerleştirilir.Kutuların üzerine; saklanan numunenin adı,laboratuvar numara aralıkları ve kutu numarası verilir.
4. Arşivlenecek numuneler -20 C yada -80C de saklanır.
5. Numunelerin saklanma süreleri soğutucuların kapasitesine göre belirlenir.
- 6.Hasta ve donörlere ait analiz sonuçları, rapor örneklerinin bir nüshası ve istem formları verilen laboratuvar numaralarına göre hem elektronik ortamda hem de yazılı ortamda klasörlenerek saklanır.
7. Yazılı arşivlerin saklanma süresi 30 yıl, elektronik arşivlerin saklanma süresi sonsuzdur.