

	T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN KODU	DS.TL.01
		YAYIN TARİHİ	20.09.2017
	MERKEZİ STERİLİZASYON ULTRASONİK YIKAMA CİHAZI ÇALIŞTIRMA TALİMATI	REVİZYON NO	02
		REVİZYON TARİHİ	01.01.2024
		SAYFA NO	1 / 2

1.AMAÇ: Ultrason yıkama cihazının doğru çalıştırılması ve kullanımını sağlamak

2. KAPSAM: Mikro cerrahi aletler ve lümenli aletlerin dekontaminasyonu

3.FAALİYET AKIŞI

3.1.Sıvı tankı işaretli yere kadar doldurulur

3.2.Sıvı içine koyulacak enzimatik solüsyon miktarı üretici firmaönerileri doğrultusunda eklenir .

3.3. Kapağı kapatılır

3.4.Cihazın fişi prize takılır.

3.5.Yıkama zamanı düğmesine basılarak istenen süre ayarlanır (510 dk)

3.6.Dijital göstergeden ısı 42 C°'ye ayarlanır

3.7.Delikli yıkama sepetine malzemeler fazla yükleme yapılmadan yerleştirilir.

3.8.Genişyüzeyli büyük cihazlar ultrasonik dalgaları engelleyeceğinden sepetin alt kısmına yerleştirilir.

3.9.Cihaz yüzeyine cerrahi aletler kesinlikle değmemelidir.

3.10.Kapaklı malzemelerin kapakları açılarak cihaza yerleştirilir.

3.11.İşlem yapılacak malzemenin tamamı sıvı içinde olmalıdır.

3.12.Kapak kapatılarak 2 defa 'START' tuşuna basılır ve çalışır

3.13.Her hangi bir problem durumunda makine durdurulacaksa makine durdurulacaksa 'STOP' tuşuna 2 defa basılır ve kapak açılır.

3.14.Yıkama bitince makine sesli uyarı verir STOP düğmesine basılır kapak açılarak malzemeler çıkarılır

3.15.Yıkama süresi bitiminde malzemeler akan suyun altında bolca durulanır.

3.16.Lümen içleri kontrol edilir, kirlilik var ise fırça yardımı ile temizlenir ve basınçlı su ve hava geçirilerek yumuşak bir bez ile kurulanır.

3.17.Ultrasonik yıkama cihazının sıvısı kirlendikçe ve de üretici firmanın önerdiği sürelerde değiştirilir

3.18.Makinenin içindeki sıvıyı boşaltmak için sağ tarafındaki vana açıldıktan sonra düğmeye basılacak ve boşaltılacak

3.19.Her solüsyon değişim sonrası boşaltılan tankın içi dezenfektan solüsyon ile ıslatılmış bez ile silinir.

3.18.Çalışırken cihazın içine asla el sokulmamalıdır.

3.19.Çalışmadığı zamanlarda cihaz elektrik fişinden çıkarılmalıdır.

	T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN KODU	DS.TL.01
		YAYIN TARİHİ	20.09.2017
		REVİZYON NO	02
	MERKEZİ STERİLİZASYON ULTRASONİK YIKAMA CİHAZI ÇALIŞTIRMA TALİMATI	REVİZYON TARİHİ	01.01.2024
		SAYFA NO	2 / 2

Ultrasonik Yıkama Makinelerinin Temizliği:

- Cihaz ve cihazın bulunduğu raf kullanım aralarında kontaminasyon varsa dezenfektanla ıslatılmış bezle silinir.
- Yeni solüsyon hazırlanmak üzere boşaltıldığında, tankın içi dezenfektan solusyonla ıslatılmış bezle ile temizlenir.
- Ultrasonik Yıkama Makinelerinin Temizliği üretici firmanın önerileri doğrultusunda yapılır.