



T.C.
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ STERRAD 100 NX HİDROJEN
PEROKSİT ÇALIŞTIRMA TALİMATI

DOKÜMAN KODU	DS.TL.04
YAYIN TARİHİ	04.09.2019
REVİZYON NO	02
REVİZYON TARİHİ	01.01.2024
SAYFA NO	1/1

- 1. AMAÇ:** Malzemelerin sterilizasyonu.
- 2. KAPSAM :** Tekstil ve toz malzemelerin dışındakilerin hepsi
- 3. FAALİYET AKIŞI:**
 - 3.1.** Cihazın ekranından elektriğinin açık olduğu kontrol edilir.
 - 3.2.** Cihazın kasetinin bitip bitmediği kontrol edilir.
 - 3.3. Door Open** üzerine dokunulur kapı açılır.
 - 3.4.** Temizliği ve paketlenmesi yapılan malzemeler Sterilizatör hücreğine en az %30 en fazla %80 kapasitede olacak şekilde dik yada yatay olarak yüklenir.
 - 3.5. Door close** yazısına dokunulur kapı kapatılır.,
 - 3.6.** Cihazın uzun (42 dk.) kısa (39dk.) olarak 2 programı vardır, malzemenin çokluk ve azlığına göre uygun program seçilir.
 - 3.7.** Cihazın ekranında standart (42 dk) veya flex (39 dk) yazısının üzerine dokunulur, daha sonra start cycle yazısı üzerine dokunulur ve çalıştırılmaya hazır hale gelir.
 - 3.8.** Sterilizasyon süresi bittiğinde cihaz sesli ikaz ve çıktı verir.
 - 3.9.** Kapısı açılınca sterilizasyon süresi tamamlanmış olur ve malzemeler cihazdan çıkartılır.