

	T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN KODU	DS.TL.05
		YAYIN TARİHİ	02.09.2015
		REVİZYON NO	02
	MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ MACOM EXACTA FLASH OTOKLAV TALİMATI	REVİZYON TARİHİ	01.01.2024
		SAYFA NO	1

1.AMAÇ: Alet sterilizasyonu

2.KAPSAM: Acil sterilizasyonu istenen malzemeleri steril etmek.

3.FAALİYET AKIŞI:

- 3.1. Cihazın fişi takılır ve cihazın sa yanında bulunan yeşil anahtar açık hale getirilir.
- 3.2. Cihazın ön kısmında bulunan **on** tuşuna basılarak cihaz belemeye alınır.
- 3.3. Cihazın ön üst kısmında bulunan su girişi yerine manüel olarak su girişi yapılır, yeteri miktarda su alınca cihazın ekranında **max** ışığı yanar ve sesli ikaz verir.
- 3.4. Su verme işlemi tamamlanır ve cihazın havasını almak için alt kısımda bulunan su çıkışı yerinden havası alınır.
- 3.5. Steril olacak malzemenin temizliği ve paketlenmesi yapıldıktan sonra malzemeye uygun program seçilir.
- 3.6. Cihazın ısı yükseldikten sonra (65 ve üzeri derece) cihaz start yapılarak çalıştırılır.
- 3.7. Sterilizasyon süresi bitince cihaz **end** yazarak sesli ikaz verir ve süreyi tamamlar.
- 3.8. Cihazın kapağı açılarak malzemeler çıkartılır.
- 3.9. Cihazın kapağı ve elektriği kapatılır.

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
	Kalite Direktörü	Başhekim

“Kalite Yönetim Sistemi” Klasöründe bulunan belge güncel ve kontrollü olup, baskı alınmış KONTROLSUZ belgedir.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.