

T.C. NECMETTIN ERBAKAN ÜNIVERSITESI TIP FAKÜLTESI HASTANESI	DOKÜMAN KODU	DS.TL.03
	YAYIN TARİHİ	29.08.2019
	REVIZYON NO	02
MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ	REVIZYON TARİHİ	01.01.2024
MAKİNELERİ GSS67H (234) CİHAZI KULLANIM TALİMATI	SAYFA NO	1/2

- **1. AMAÇ:** Getinge Gss67f1 Otoklav Makineleri Gss67h (234) cihazının doğru çalıştırılması ve kullanımını sağlamak
- 2. KAPSAM: Yıkama cihazlarının dekontomanisyonu
- 3. FAALİYET AKIŞI
 - 3.1. Genel İş akışı :
 - **3.1.1.** Sterilizasyon işlemi aşağıdaki sıraya göre gerçekleştirilmelidir. Aşağıdaki sayfalarda her bir adım genel hatlarıyla açıklanmıştır.
 - 3.1.2. Programı seçin.
 - 3.1.3. Sterilizatörü yükleyin.

NOT: Program hemen başlatılmalıdır, aksi takdirde yük önceden ısıtılmış olur ve sterilizasyon işleminin sonucu yeterli olmaz.

- **3.1.4.** Program başlatın.
- **3.1.5.** Program bittiğinde sterilizatörü boşaltın.
- **3.1.6.** Yükün kontrol edilmesi ve onaylanması.
- **3.1.7.** Sterilizasyon işleminin onaylanması.

3.2. Program Seçin:

NOT: Program Seç menüsü görüntülenmiyorsa, görünene kadar Geri düğmesine dokunun

- 3.2.1. Uygun programı seçmek için ilgili düğmeye dokunun.
- 3.2.2 Sterilizatörü Yükleyin :
- 3.2.3. Kapağı aç düğmesine dokulunur.
- 3.2.4. Sterilizatör yükleyin
- 3.2.5.Kapağı kapat düğmesine dokunun.

3.3 Programı Başlatın :

Not: Program parola korumalı ise, ilgili ait sıradaki talimatları uygulayın.

- 3.3.1. Program başlat düğmesine dokunun
- 3.3.2. Sürdür düğmesine dokunun.
- **3.3.3.** Program bittiğinde Sterilizatörü Boşaltma bölümüne geçin.

3.4. UYARI YARARLANMA RİSKİ

- 3.4.1. Basınç göstergesindeki kırmızı alanda bulunan değer tehlikeli basıncı belirtir.
- **3.4.2.** Basınç göstergesindeki değer kırmızı alanda ise ortam hemen terk edin ve yerel servis teknisyenini arayın.

3.5. Parola Korumalı ise

- 3.5.1. Programı başlat düğmesine dokunun.
- **3.5.2.** Kullanıcı adını ve parolayı girin.
- **3.5.3. Oturum aç** düğmesine geçin.
- **3.5.4.** Program bitiğinde Sterilizatörü Boşaltma bölüne geçin.

3.6. Sterilizatör Boşaltma

- 3.6.1. Kapağı Aç düğmesine dokunun.
- 3.6.2. Sterilizatörü boşaltın.
- 3.6.3. Kapağı Kapat düğmesine dokunun

"Kalite Yönetim Sistemi" Klasöründe bulunan belge güncel ve kontrollü olup, baskı alınmış KONTROLSUZ belgedir.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.



T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN KODU	DS.TL.03
	YAYIN TARİHİ	29.08.2019
	REVIZYON NO	02
MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ	REVIZYON TARİHİ	01.01.2024
MAKİNELERİ GSS67H (234) CİHAZI KULLANIM TALİMATI	SAYFA NO	2/2

3.7. UYARI YANMA TEHLİKESİ

3.7.1. Kapı ve hazne sıcak olabilir ve yanıklara sebep olabilir. Kapısı açıkken, haznenin içindeki sıcak yüzeylere dikkat edin.

3.8. Yükü Kontrol Etme Ve Onaylama

- **3.8.1.** Yükün temiz, kuru ve hasarsız olduğundan emin olun.
- **3.8.2.** Yük temiz ya da hazarsız değilse, yeniden paketlenmeli ve tekrar sterilize edilmelidir.

3.9. Sterilizasyon İşleminin Onaylanması

3.9.1. İşlem raporunu kontrol edin ve imzalayın.

3.10. Devam Eden İşlem Sırasında Alarma Müdahale

- 3.10.1. Alarm Sessiz düğmesine basın.
- **3.10.2.** Servis teknisyeni ile iletişim sırasında kullanmak üzere alarm hata kodunu not edin.
- **3.10.3. Onayla** düğmesine dokunun.

3.11. Alarm Durumunda Programı Sonlandırma

- 3.11.1 Programı Sonlandır düğmesine dokunun.
- 3.11.2 Kapağı Aç düğmesine dokunun.
- 3.11.3 Sterilizatörü boşaltın
- 3.11.4 Kapağı Kapat düğmesine dokunun.
- **3.11.5** Yükü yeniden paketleyin ve tekrar sterilize edin.

Not: Alarmın sebebi ortadan kaldırın ya da müdahale etmesi için servis teknisyeni arayın.

3.12. Bekleme Sırasında Alarma Müdahale

- 3.12.1 Alarm Sessiz Düğmesine basın
- 3.12.2 Servis teknisyeni ile iletişim sırasında kullanmak üzere alarm hata kodunu not edin
- 3.12.3 Onay düğmesine dokunun
- 3.12.4 Sürdür düğmesine donunun
- **3.12.1** Programı seç görünümü görüntülenir.

"Kalite Yönetim Sistemi" Klasöründe bulunan belge güncel ve kontrollü olup, baskı alınmış KONTROLSUZ belgedir.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.