

	T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN KODU	DS.TL.07
		YAYIN TARİHİ	01.01.2016
		REVİZYON NO	02
	MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ LÜMENLİ MALZEMELER TEMİZLEME TALİMATI	REVİZYON TARİHİ	01.01.2024
		SAYFA NO	1

1.AMAÇ: Lümenli malzemelerin temizliği

2.KAPSAM: Tüm lümenli malzemelerin temizliği

3. FAALİYET AKIŞI:

- ❖ Şehir suyu, deterjan seviyeleri kontrol edilip cihaz kullanıma hazırlanır.
- ❖ Lümenli malzemeler yıkama makinası için uygun olan aparata yerleştirilir.
- ❖ Cihazın ön panosunda “Emergency” butonuna basılmamış olduğuna bakılır.
- ❖ Cihazın “On/Off” butonu “On” konumuna alınır. Cihazın ekranına CISA amblemi – Cihaz Model No ve Cihaz Seri No gelecektir.
- ❖ Cihazın kapısının açılması için Kapı Açma butonuna basıp kapının tam olarak açılmasına kadar buton böylece basılı tutulur.
- ❖ Yıkanacak ürün elle veya lümenli malzemeler yıkama aparatı ile cihaza doldurulur.
- ❖ Cihaz ekranının herhangi bir noktasına dokunulur. Ekran “Menu” tablosu gelecektir.
- ❖ Değerler kontrol edilir.
- ❖ Kapı kapatılması için Ana Panoda ve ekrandaki Kapatma Butonlarının ikisine birden ve aynı anda basılıp kapı kapatılır.
- ❖ Yıkama programı seçilir. (Lümenli malzemeler için uygun olan program seçilir.)
- ❖ Operatör Kod No girilir.
- ❖ Ana Menüye dönmek için (Menu) Tuşuna basılır. Kapının kapalı olduğu , deterjan seviyesinin normal olduğu, printerdaki kağıdın mevcudiyeti kontrol edildikten sonra “Ana Menu” ye dönmek üzere “Menu” tuşuna basılır.
- ❖ Burada Start tuşuna basılıp cihaz çalıştırılır. Seçilen programdan sonra yıkama tamamlanır.
- ❖ Ekranda “Cycle End” mesajı ve ‘Ürün Sıcak Dikkatli Boşalt’ uyarısı görülecektir.
- ❖ Cihazın boşaltma kapısı açılır.
- ❖ Cihaza yerleştirilmeye uygun olmayan (aspiratör ucu vb...) lümenli malzemeler basınçlı su ve basınçlı hava tutularak temizlenir.

NOT: iki kapılı cihazlarda temiz taraf kapısında tahliye yapılır. Temiz taraf kapısı açık olduğu durumda kirli taraf kapısı açılmaz.