

	T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN KODU	DS.TL.06
	MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ STERRAD 100 ES HİDROJEN PEROKSİT ÇALIŞTIRMA TALİMATI	YAYIN TARİHİ	02.09.2015
		REVİZYON NO	02
		REVİZYON TARİHİ	01.01.2024
		SAYFA NO	1

1.AMAÇ : Malzemelerin sterilizasyonu

2.KAPSAM: Tekstil ve toz malzemelerin dışındakilerin sterilizasyonu

3.FAALİYET AKIŞI:

- 3.1.** Cihazın ekranından elektriğinin açık olduğu kontrol edilir.
- 3.2.** Cihazın kasetinin bitip bitmediği kontrol edilir.
- 3.3.** Cihazın ekranında **READY TO USE** yazısı görünür cihaz çalıştırılmaya hazır hale gelir.
- 3.4.** Kapıyı açın yazısına basılarak kapı açılır.
- 3.5.** Temizliği ve paketlenmesi yapılan malzemeler Sterilizatör hücreğine en az %30 en fazla %80 kapasitede olacak şekilde dik olarak yüklenir.
- 3.6.** Kapıyı kapatın yazısına basılarak kapı kapatılır.
- 3.7.** Cihaz Uzun (71dk.) kısa(52dk.) olarak 2 program vardır, malzemenin çokluk ve azlığına göre uygun program seçilir.
- 3.8.** Malzeme çoksa **BAŞLAT-İPTAL-BAŞLAT** yazılarak cihaz çalıştırılır, az ise **BAŞLAT-BAŞLAT** yapılarak kısa programda cihaz çalıştırılır.
- 3.9.** Sterilizasyon süresi bittiğinde cihaz sesli ikaz ve çıktı verir.
- 3.10.** Kapısını atığında sterilizasyon süresi tamamlanmış olur ve malzemeler cihazdan çıkartılır.

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
	Kalite Direktörü	Başhekim

“Kalite Yönetim Sistemi” Klasöründe bulunan belge güncel ve kontrollü olup, baskı alınmış KONTROLSUZ belgedir.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.