



**T.C.
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ**

**STREİLİZASYON ÜNİTESİ GETİNGE YIKAMA GSS67F
CİHAZI KULLANIM TALİMATI**

DOKÜMAN KODU	DS.TL.02
YAYIN TARİHİ	29.08.2019
REVİZYON NO	02
REVİZYON TARİHİ	01.01.2024
SAYFA NO	1 / 2

- AMAÇ:** Getinge Yıkama GSS67F cihazının doğru çalıştırılması ve kullanımını sağlamak
- KAPSAM:** Yıkama cihazlarının dekontomanisyonu
- FAALİYET AKIŞI;**

3.1 Başlamadan önce :

- 3.1.1.** Kullanım amaç ve işlevlerine göre makine aksesuarlarını gözle kontrol edin.
- 3.1.2.** Makinenin performansını etkileyebilecek tıkalı kanallar, aşınmış ve kayıp parçalar olmadığına emin olun.
- 3.1.3.** Amaçlanan temizlik ve dezenfeksiyonu elde etmek için yıkanacak eşyaları yıkama tepsisine geçerli talimatlarda açıklandığı gibi yükleyin.
- 3.1.4.** Su, tübüler aletlerin kanalları boyunca serbestçe akabilmelidir.

3.2. Yıkama başlama :

- 3.2.1.** Kapağı açma düğmesine basarak kapağı açın.
- 3.2.2.** Yıkama tepsisini sonuna kadar makinenin içine itin, Yıkama tepsisini iç haznedeki yerleştirme istasyonlarına düzgün bağlandığına emin olun.
- 3.2.3.** Püskürtme kollarının serbestçe dönebildiğinden emin olun.
- 3.2.4.** Kapağı kapat düğmesine basarak kapı kapatılır
- 3.2.5.** Operatör panelindeki program seçim ekranından söz konusu eşyalar için bir program seçin.
- 3.2.6.** Program başlat Düğmesine basarak programı başlatın. Program başlatma, düğmesine basılarak kapak kapalıyken duraklatılabilir. Kapak açıkken, yeni bir program seçimi yapılabilir.

3.3. Devam Eden Program Sırasında:

- 3.3.1.** Durum ekranı, programın başlatıldığını gösterir ve devam eden yıkama döngüsü sırasında görüntülenir.
- 3.3.2.** Seçilen program ve kalan süre ekranda görünür uygun şekilde görünür.
- 3.3.3.** Devam eden programı sonlandırmak isterseniz iptal düğmesine basın .

3.4. Makinenin Boşaltılması :

- 3.4.1.** Döngü sona erdiğinde ve hiç hata olmamışsa, yeşil ekran belirir ve eşyaların dezenfekte edildiğini ve çıkarılmaya hazır olduğunu gösterir.
- 3.4.2.** Kapak tamamlanmış ve onaylanmış bir yıkama programının sonunda otomatik olarak açılır.
- 3.4.3.** Eşyaları makineden çıkarın.
- 3.4.4.** Temizlik sonuçlarını gözle kontrol edilir.,
- 3.4.5.** Kapağı kapat düğmesine basarak kapağı kapatın.

3.5. Uyarı ve Alarm:

- 3.5.1.** Yıkama döngüsü, başlatılmıyor ve sonlandırılmıyorsa, operatör panelinde bir alarm ve uyarı gösterilir.

3.6. Kullanım Uyarıları:

- 3.6.1.** Uyarılar sarı ekranda gösterilir.
- 3.6.2.** Uyarı hakkında daha fazla bilgi görüntülemek için (?) düğmesine basın.
- 3.6.3.** Uyarı doğrulamak için (V) düğmesine basın.
- 3.6.4.** Hatayı tarif edilen şekilde düzeltin ya da servis elemanlarını çağırın. Uyarı, bu uyarının nedeni düzeltilene kadar aktif kalır.



T.C.
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

STERİLİZASYON ÜNİTESİ GETİNGE YIKAMA GSS67F
CİHAZI KULLANIM TALİMATI

DOKÜMAN KODU	DS.TL.02
YAYIN TARİHİ	29.08.2019
REVİZYON NO	02
REVİZYON TARİHİ	01.01.2024
SAYFA NO	2 / 2

3.7. Kullanım Alarmları :

3.7.1. Alarmla kırmızı bir ekran ile gösterilir.

NOT: Makinenin içindeki eşyalar temiz değildir ve en baştan yıkanmaları gerekir.

1. Alarm sinyalini kapatmak için iptal düğmesine basın.
2. Alarm kodunu not edin.
3. Alarm hakkında daha fazla bilgi görüntülemek için (?) düğmesine basın.
4. Hatayı tarif edilen şekilde düzeltin ya da servis elemanlarını çağırın.
5. Alarmı doğrulamak için (✓) düğmesine basın. Su makineden boşaltılır ve kirli taraftaki kapak artık açılabilir.