

“Enlil PACS” e Kullanıcı adı ve Şifreyi girip giriş yapıyoruz.

T.C. Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi

enlil PACS
Anadolu Rüyaları...

→ Kullanıcı Kodu
→ Parola
Dil Seçimi: TÜRKÇE
Adı Soyadı

☐ Debug
☐ DICOM Debug
☒ Konsol Debug

Kullanım Kılavuzunu okuyunuz.

Tamam **Vazgeç**

CE Can Eroğlu Bilgi Sistemleri **SN** v2.5.32-b011 31.05.2016

Kullanıcı adı ve şifre girildikten sonra Görüntüleme Tıkliyoruz.



Görüntüleme ekranında Hasta Cd sekmesi tıklıyoruz.

enliPACS - T.C. Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi - ERDOĞLU USER (ADH100) - Sorgu Ekranı

Hasta Numarası
Hasta Adı Soyadı
Erişim Numarası
Doktor
Çalışma Açık
Alınan AET
Hazır Filtreler

Modality
Durum
Cinsiyet

İsteyen Servis
Doğum Tarihi
Çalışma Tarihi
Çalışma Listesi
Sunucu

Sorgula
Yükle
Temizle
Görüntüleyici
Raporlama
Ayarlar

Hasta No
Hasta Adı
Doğum T.
Çalışma T.
Çalışma Açık
Çalışma No
Modaliteler
Erişim No
Ref. Doktor
İst. Bölüm
Rapor D.
Cins
Top. G.
Notlar
Sıra

Seri No
Seri Açıklaması
Protokol
Modalite
Toplam Görüntü
Seri IUID

Hasta Cd sekmesini tıkladıktan sonra Gözet Tıkliyoruz.


culipACS - T.C. Bezmîâli Erişkan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi - EROGLU USER (ADMIN) - Sıngır Ekrani

Hasta Numarası		Modality	☐ CR ☐ CT ☐ MR ☐ DR	İsteyen Servis				
Hasta Adı Soyadı			☐ DX ☐ EGD ☐ MG ☐ NM		Doğum Tarihi			
Erişim Numarası			☐ OT ☐ PT ☐ RF ☐ RT			Çalışma Tarihi		
Doktor			☐ US ☐ SC ☐ XA ☐ HC				Çalışma Listesi	
Çalışma Açık			☐ SR ☐ PR ☐ KO ☐ ES					Sunucu
Alınan AET	Tümü	Durum	Tümü					
Hazır Filtreler	Seçiniz	☐ Kullanıcıya Göre Rapor Du...	Cinsiyet	Tümü				


Sunucu Hasta Listesi **Hasta CD**

☐ DICOMDIR


Gözet sekmesini tıkladıktan sonra open penceresi açılıyor. Open penceresinde Look in alanında CD-DVD sürücüyü seçiyoruz.

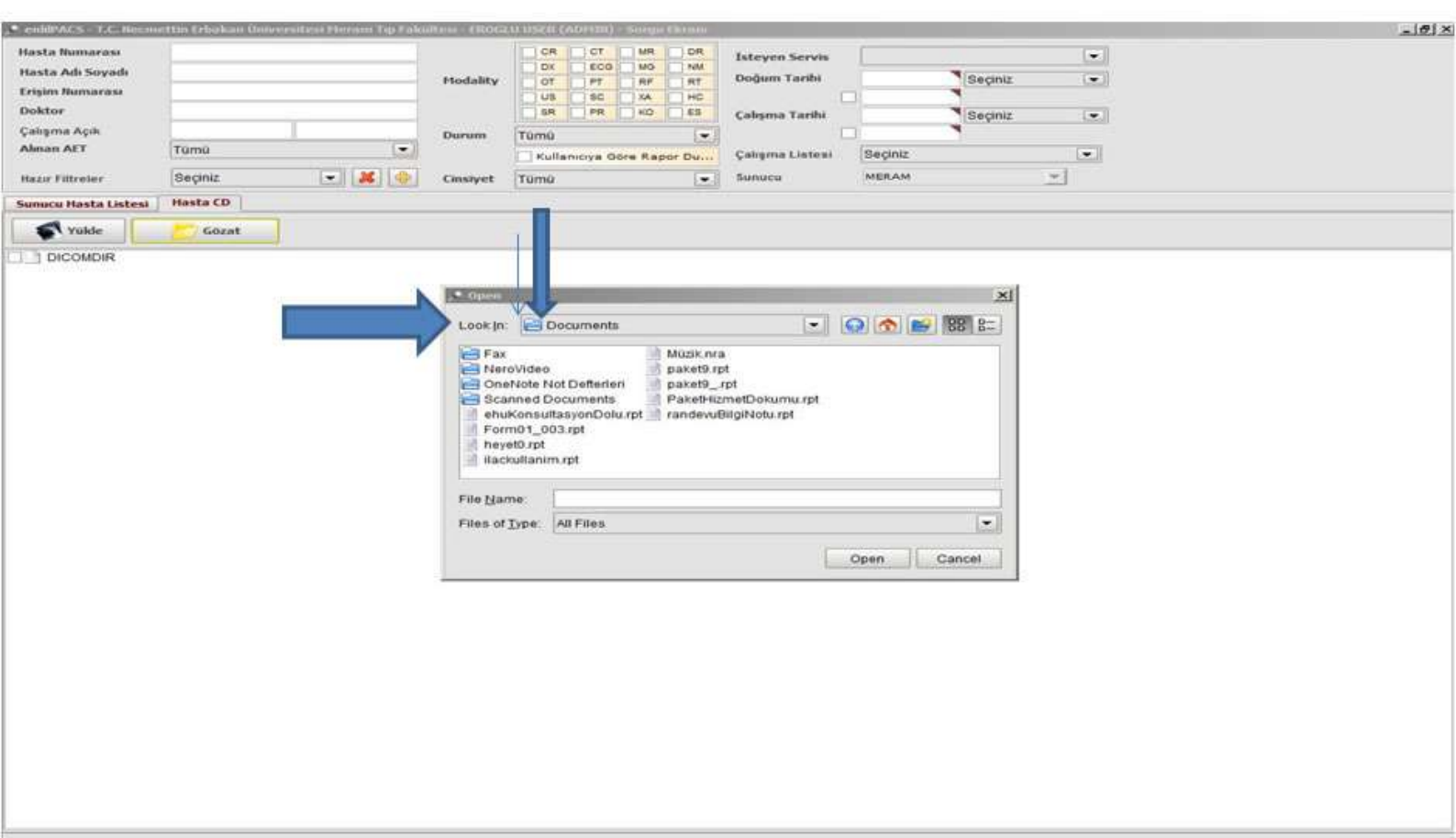


Cd&Dvd'yi seçimini yaptıktan Cd&Dvd'nin içinde Dicom klasörü yada DicomDIR seçerek Open butonunu tıkladığımızda görüntüleri otomatik olarak seçiyor. Aynı zamanda DicomDIR(Mavi) dosyasını seçtiğiniz zaman DicomDIR(Mavi) clickini işaretlemeniz gerekmektedir. İşaretleme yaptıktan sonra yükle butonuna basarak görüntüleri yüklemeye başlıyor.

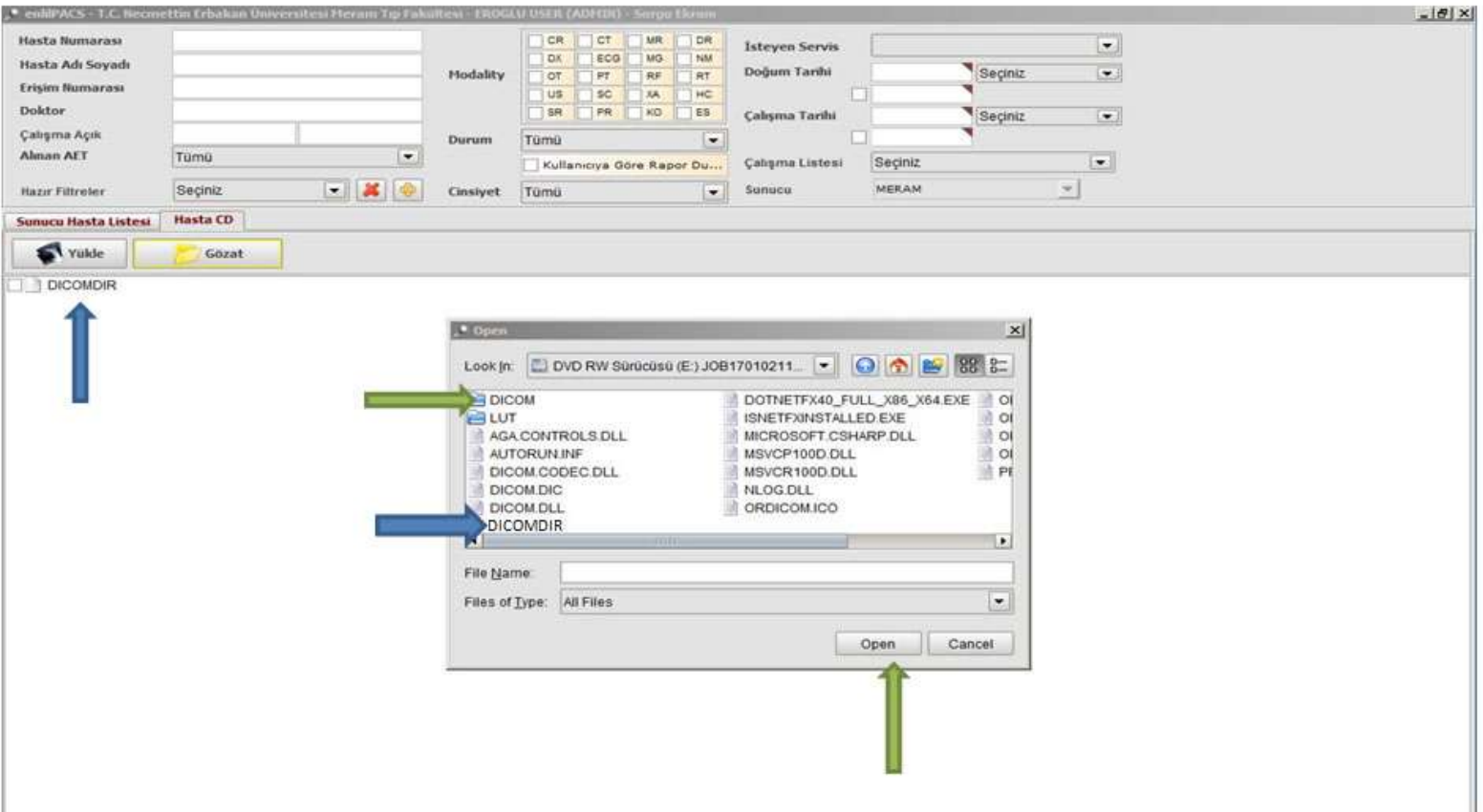


Pacs görüntüleri %100 tamamlandıktan sonra görüntülerden herhangi birini seçerek F5 tuşuna bastığınızda görüntülerin hepsini otomatik olarak seçmiş oluyoruz. Sol alt köşede profil resmini(Yeşil Ok) tıkladığınızda Hasta arama ekranı açılır.

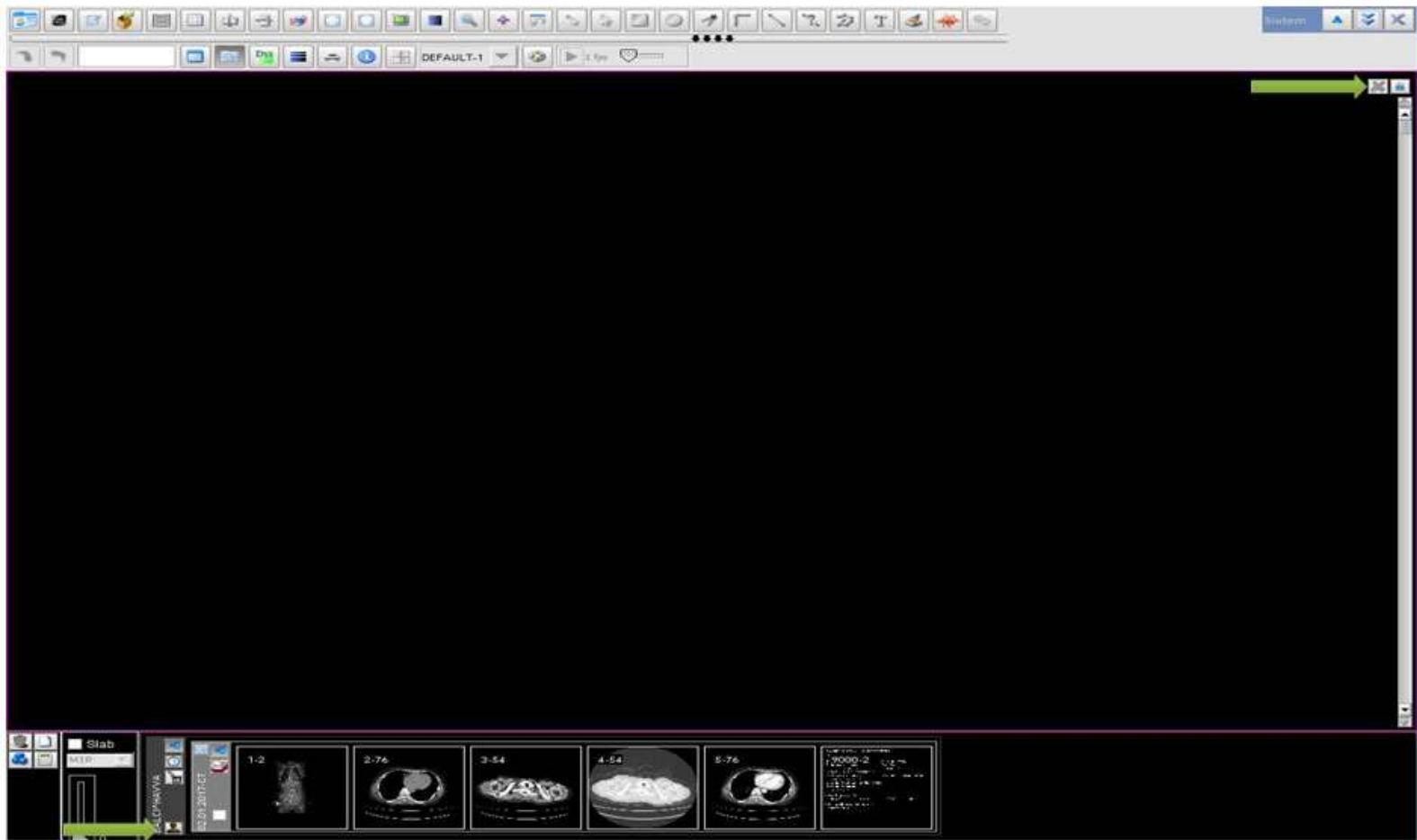

Hasta arama ekranı açıldıktan Hastanın Dosya nosu girilir ve sorgula butonuna basılır. Sorgulama yaptıktan sonra hastanın dosya bilgileri alt ekranda açılarak; seç butonuna basılır. Ekranı seçtikten sonra uyarı penceresi gelecek. Gelen ekranda Evet butonuna tıklayarak görüntüleri seçmiş oluyoruz.

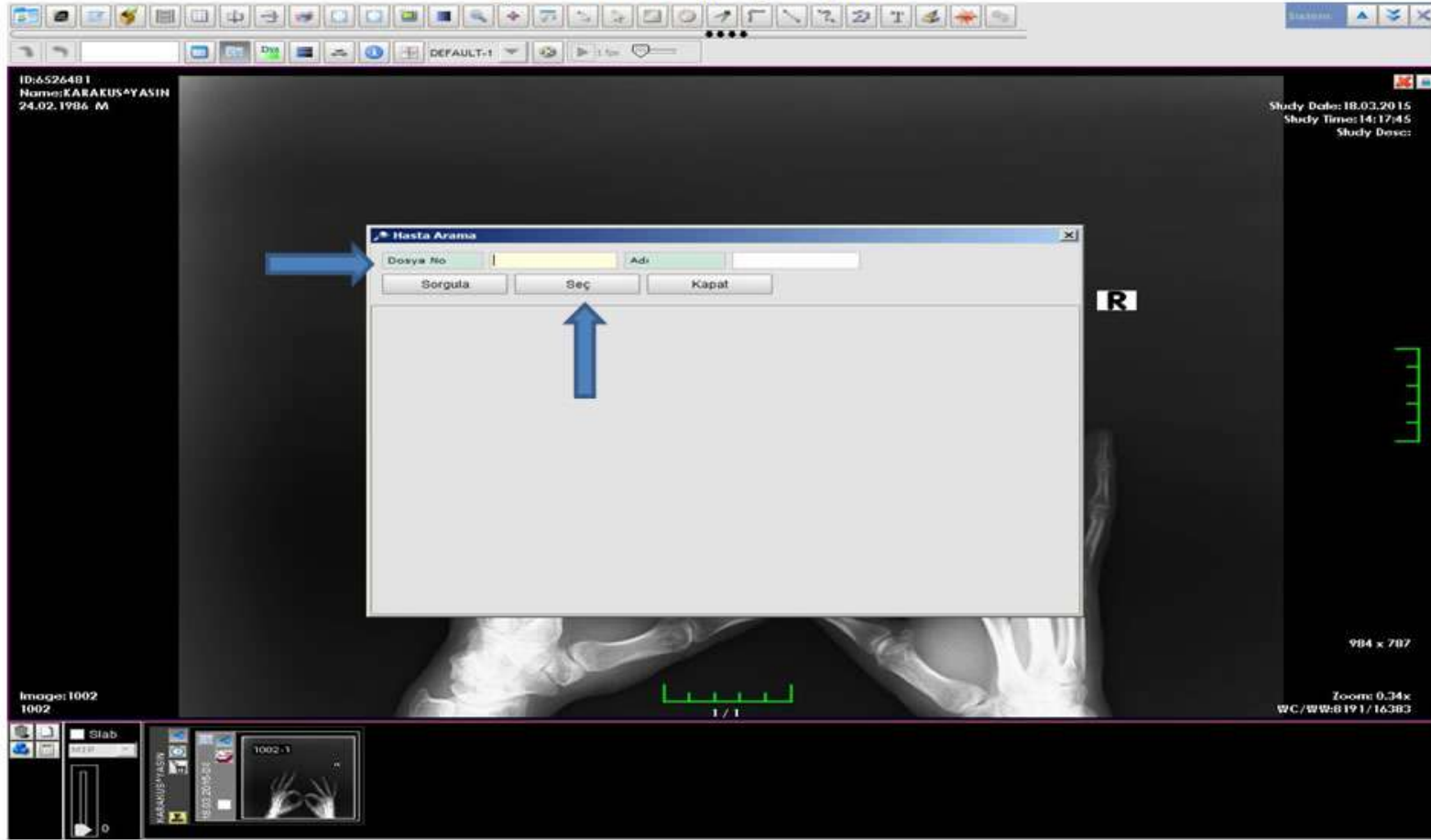

Görüntülerin seçimi yapıldıktan dışa aktar(Yeşil Ok) sekmesini tıklayarak; sekmenin içindeki Başka Arşiv Sunucuya Gönder sekmesini işaretliyoruz. İşaretleme yapıldıktan sonra Görüntü Gönderim Seçim Ekranı açılıyor. Bu ekranda Hedef Nod alanında yedek pacs sunucusu yazan yeri işaretleyerek Enlil Arşiv sekmesi olarak değiştiriyoruz. Enlil Arşiv sekmesi olarak seçtikten sonra gönder butonuna tıklıyoruz ve görüntüleri sisteme atılmış oluruz.

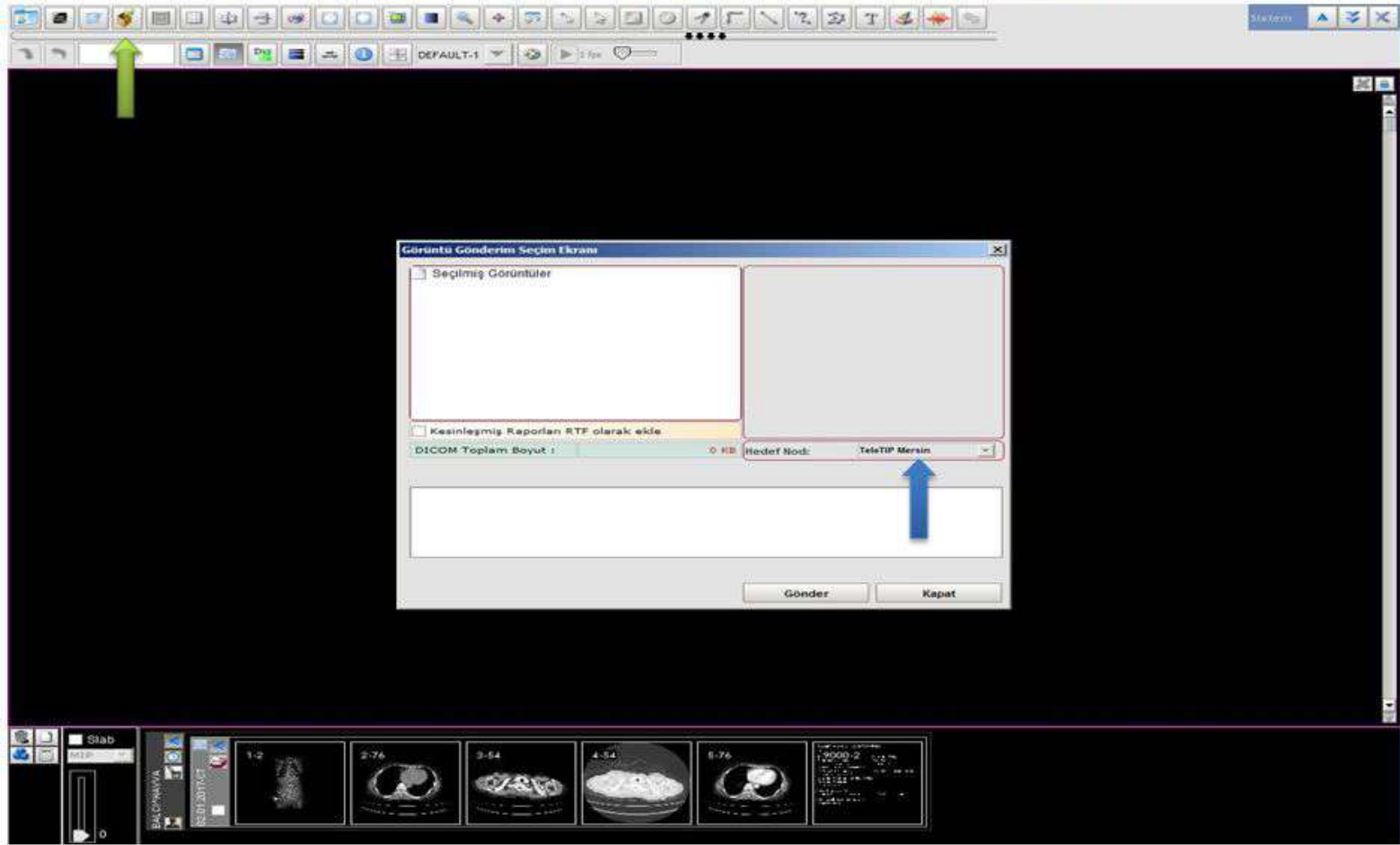

Görüntülerin sisteme atıldıktan sonra dışa aktar(Yeşil Ok) sekmesini tıklayarak Gönderim kuyruğu penceresi açılıyor. Bu açılan pencerede görüntülerin sisteme atıp atmadığının kontrolünü yapabilirsiniz .

