

	T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN KODU	TT.039
		YAYIN TARİHİ	01.05.2006
	KAN MERKEZİ IŞINLAMA CİHAZI KULLANMA TALİMATI	REVİZYON NO	03
		REVİZYON TARİHİ	01.06.2021
		SAYFA NO	1 / 1

- AMAÇ:** Kan Merkezinde bulunan ışınlama cihazının doğru ve hızlı bir biçimde çalışmasını sağlamak.
- KAPSAM:** Kan merkezi ışınlama ünitesindeki ışınlama cihazı.
- FAALİYET AKIŞI:**
 - 3.1. Anahtar sağa doğru çevrilerek açılır.
 - 3.2. Cihazın kapağı açılır ve kan veya kan komponenti ters bir şekilde silindirik şeklindeki kutuya yerleştirilir.
 - 3.3. Kontrol panelinde 1 tuşuna basılır.
 - 3.4. Tuşlar yardımıyla 21 yazılır ve ENTER tuşuna basılır.
 - 3.5. Ekranda PIN yazısı görülür ve 54321 yazılır ve ENTER tuşuna basılır.
 - 3.6. Kontrol panelinde 1 tuşuna basılır.
 - 3.7. Ekranda HH MM SS yazıları görülür.
 - 3.8. Kan ışınlama cihazı ışınlama süreleri çizelgesinden satırlardan ışınlama işleminin yapıldığı tarih bulunur ve 2500cGy sütununa karşılık gelen süre,
HH MM SS
00 03 22 yerine yazılır.
 - 3.9. İki defa ENTER tuşuna basılır.
 - 3.10. START tuşuna basılarak işlem başlatılır.
 - 3.11. İşlem bitiminde cihaz sesli uyarı verir. Komponent cihazın kapağı açılarak cihazdan çıkartılır.
 - 3.12. Anahtar sola çevrilerek cihaz kapatılır.