

	T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN KODU	TT.040
		YAYIN TARİHİ	01.05.2006
	REVİZYON NO	03	
	REVİZYON TARİHİ	01.06.2021	
	KAN MERKEZİ ÖRNEK HAZIRLAMA TALİMATI	SAYFA NO	1 / 1

1. AMAÇ: Kan Merkezinde uygulanan immünohematolojik ve serolojik testler için örnek hazırlama yöntemlerini açıklamak.

2. KAPSAM: Kan Merkezi immünohematoloji ve seroloji laboratuvarındaki tüm testler.

3. FAALİYET AKIŞI:

3.1.İmmünohematoloji Örnek Hazırlama

3.1.1.Kullanılacak antikoagülanlı tam kan,immünohematoloji testlerini çalışan teknisyen tarafından masaüstü santrifüjünde 5000 devirde 5 dk santrifüj edilerek serum veya plazması ayrılır.Böylece plazmanın üst kısımda eritrositlerin tabana çökmesi ve istenilen tekkikin çalışılacak hale gelmesi sağlanmış olur.

3.2.Eliza Örnek Hazırlama

3.2.1. Gelen numuneler 5000 rpm de 5 dk santrifüj edilir. Santrifüj edilmeden önce gelen numuneler eliza defterine kaydı tutulur.5 dk santrifüj edildikten sonra makro eliza cihazında testleri çalışmaya hazır hale gelir.

3.3.Eritrosit süspansiyonu ve Plazma Hazırlama

3.3.1. Santrifüj aşamasında hazırlanan örnekler testler için kullanıma hazırdır.

