



1. AMAÇ

Kan kültürü testinin optimal şartlarda gerçekleştirilmesi.

2. KAPSAM

Kültür Laboratuvarı.

3. UYGULAMA

3.1. Biyolojik Örnek Taşıma Talimatına göre Mikrobiyoloji Laboratuvarına getirilen kan kültür şişeleri Kültür Laboratuvarı Kayıt görevli teknisyenine teslim edilir.

3.2. Kayıt işleminden sonra cihazın bilgisayarına hasta bilgileri girilir.

3.3. Barkod okuyucu ile hafızaya alınır ve hangi kuyucuğa konması gerekirse o kuyucuğa konur.

3.4. Daha önceden cihaza yüklenmiş şişelerden inkübasyon süreleri bitip üreme olmayanlar negatif şişe olarak monitörde gözükür.

3.5. Negatif şişeler cihazdan çıkartılır, "steril" şeklinde sonuç girilir.

3.6. Bu sonuç HYBS programında hasta kayıtlarına geçirilir.

3.7. Pozitif şişelerden işlemi tamamlananlar defterden kontrol edilip **Hastane Atık Talimatına** göre uzaklaştırılır.

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- **TT.047 Biyolojik Örnek Taşıma Talimatı**
- **TT.067 Kültür Laboratuvarı Talimatı**
- **IT.003 Hastane Atık Talimatına**