



T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN KODU	TT.187
	YAYIN TARİHİ	01.04.2013
VİDAS CİHAZI KULLANMA VE BAKIM TALİMATI	REVİZYON NO	01
	REVİZYON TARİHİ	01.06.2021
	SAYFA NO	1 / 1

1. **AMAÇ** : Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi mikrobiyoloji laboratuvarında kültürde değerlendirilen örneklerin VİDAS cihazında doğru olarak çalışılması ve bakımını belirler.
2. **KAPSAM** : Meram Tıp Fakültesi Hastanesi mikrobiyoloji laboratuvarını kapsar.
3. **SORUMLU** : Bu talimatın uygulanmasından ilgili laboratuvar teknisyeni sorumludur.
4. **UYGULAMA** :
  - 4.1. **KULLANIM** :
    - 4.1.1. VİDAS cihazı normal şartlarda sürekli olarak açık tutulur
    - 4.1.2. Cihazın sarf malzemelerinin durumu kontrol edilir.
    - 4.1.3. Cihazın LİS bağlantısı kontrol edilir.
    - 4.1.4. Gerekirse kalibrasyonlar ve kalite kontrol uygulamaları yapılarak kayıt altına alınır ve sonuçları değerlendirilir
    - 4.1.5. Hasta numaraları bilgisayara çalışılacak testlere göre yerleştirilir.
    - 4.1.6. Burada oluşan hasta çalışma listesine göre kitler sıralanır.Artık çalışma hazırdır.
    - 4.1.7. Serumlar cihaza yerleştirilir sonuçlar otomatik olarak yazıcıdan çıkar.
    - 4.1.8. Sonuçlar LİS bağlantısı olan bilgisayara girilir ve sorumlu doktor tarafından sonuçlar kontrol edilerek onaylanır.
  - 4.2. **BAKIM** :
    - 4.2.1. Cihazın kullanım öncesi ve sonrası aylık bakımları firma tarafından yapılır
    - 4.2.2. Herhangi bir arıza oluşması durumunda ilgili yetkili servis aranarak ve arıza bildirim formu doldurulup ilgili firmaya faks çekilerek yardım istenir.

"Kalite Yönetim Sistemi" Klasöründe bulunan belge güncel ve kontrollü olup, baskı alınmış KONTROLSUZ belgedir.

**ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.**

KY-FR.01.11 REV.00