

	T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN KODU	TT.197
		YAYIN TARİHİ	01.04.2013
		REVİZYON NO	02
	KAN MERKEZİ HELMER MARKA PLAZMA VE CRYOPRSİPİTATERİTME	REVİZYON TARİHİ	01.06.2021
		SAYFA NO	1 / 1

**1. AMAÇ:** Derin dondurucuda dondurulmuş plazma ve cryopresipitatların uygun ısıda 37 derecede eritilmesini sağlamak.

**2. KAPSAM:** Helmer cihazını kapsar.

**3. FAALİYET AKIŞI:**

**3.1.**Cihaz poşetinin içine plazmalar konularak 8 adet 37 derecede cihazın start düğmesine basılarak çalıştırılır.

**3.2.**16 dakika sonar cihaz sesli mesaj vererek eritme işleminin bittiğini uyarı verir.

**3.3.**Plazmalar servis personeline teslim edilir.

