

	T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN KODU	TT.201
		YAYIN TARİHİ	01.04.2013
	KAN MERKEZİ NÜVE 1215 MANUEL CROSS SANTRİFÜJÜ KULLANMA TALİMATI	REVİZYON NO	02
		REVİZYON TARİHİ	01.06.2021
		SAYFA NO	1 / 1

- AMAÇ:** Nüve marka santrifüj cihazının çalışmasının düzenlenmesi
- KAPSAM:** Nüve 1215 Santrifüj cihazını kapsar.
- FAALİYET AKIŞI:**
 - Cihaz önündeki açma kapama düğmesinden açılır.
 - Uygun şekilde hazırlanan polistrene tüpler cihaza karşılıklı denge oluşturacak şekilde yerleştirilir.
 - Kapağı kapatılarak ön çalıştırma tuşuna basılır.
 - 1030 devirde 1 dakika çalışan cihaz düğmesinden kapatılır ve değerlendirilir.



“Kalite Yönetim Sistemi” Klasöründe bulunan belge güncel ve kontrollü olup, baskı alınmış KONTROLSUZ belgedir.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.